

Подставки



Заказать и купить

Подставки для медицинской мебели

Вы можете на сайте

<https://WKmed.by/>

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общие указания
- 2 Назначение
- 3 Основные технические данные
- 4 Комплектность
- 5 Инструкция по сборке
- 6 Свидетельство о приёмке
- 7 Свидетельство об упаковывании
- Приложение 1 Контактные телефоны

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, совмещенным с инструкцией по сборке подставок.

1.2 Данный паспорт должен находиться у лиц, ответственных за их сохранность.

1.3 В связи с постоянным усовершенствованием изделий, внесением конструктивных изменений, повышающих надёжность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией подставок и настоящим паспортом.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Подставки предназначены для установки на них изделий следующих наименований: стерилизаторы воздушные (ГП-20 СПУ, ГП-40 СПУ, ГП-80 СПУ), термостаты электрические суховоздушные (ТС-1/20 СПУ, ТС-1/80 СПУ), шкафы сушильные ШС-80-01 СПУ (200°C), ШС-80-01 СПУ (350°C), электропечь ЭКПС-10.

2.2 Размещение изделий на подставки дает возможность более эффективно использовать площадь лабораторий, кабинетов и других помещений, облегчает их уборку, делает использование изделий более удобным.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Подставки могут быть выполнены с лакокрасочным покрытием и из нержавеющей стали.

3.2 Подставки (рисунок 1) состоят из основания, ножек и полки.

3.3 Габаритные размеры подставок приведены в таблице 1.

3.4 Поверхности подставок допускают дезинфекцию способом протирания растворами дезинфицирующих средств, разрешённых в Российской Федерации для дезинфекции поверхностей в соответствии с действующими методическими документами по применению конкретного средства.

3.5 Подставки могут эксплуатироваться в помещениях с диапазоном температуры окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°C и атмосферном давлении (84-107 кПа) 630-800 мм Т. ст.

Таблица 1

Наименование изделий	Размеры подставок , мм		
	Ширина	Длина	Высота
ГП-20	327	641	751,5
ГП-40	387	722	751,5
ГП-80	457	832	751,5
ТС-1/20	317	367	751,5
ТС-1/80	467	517	751,5
ШС-80-01 (200°C)	447	687	751,5
ШС-80-01 (350°C)	507	687	751,5
ЭКПС-10	487	497	751,5
ГП-20 нерж.сталь	327	641	751,5
ГП-40 нерж. сталь	387	722	715,5
ГП-80 нерж. сталь	457	832	715,5

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки подставок приведён в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Кол-во, шт.
Основание	1
Ножка	4
Полка	1
Винт-саморез 4,2x14,PH2с полукруглой головкой, с пресс шайбой	4
Винт с полукруглой головкой и прессшайбой, универ, М6-6gx16 (DIN967)	16
Гайка М6-6Н.05.016 ГОСТ5927-70	16
Шайба 6.65Г.016 ГОСТ6402-70	16
Шайба С6.04.016 ГОСТ11371-78	16

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

5.1 Извлечь комплект подставки из ящика

5.2 Освободить от бумаги основание, ножки, полку и крепежные изделия.

5.3 Собрать подставку в соответствии с рисунком 1 с помощью винтов с полукруглыми головками (16шт), закрепив их с другой стороны гайками с шайбами 6.65Г.016 и С6.04.016.

5.4 Закрутить в основание подставки винты-саморезы головкой вверх.

5.5 Установить изделие на подставку таким образом, чтобы головки винтов-саморезов попали в полости ножек изделия, для предотвращения скольжения изделия по поверхности подставки.



Рисунок1 – Схема сборки подставки

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Подставка

код товара

Изготовлена и принята в соответствии с требованиями ПГИЖ.301318.34 и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Подставка

код товара

Упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

WKmed.by

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Смоленское СКТБ СПУ»**

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97 Контактные
телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90

Заказать и купить

Подставки для медицинской мебели

Вы можете на сайте

<https://WKmed.by/>

