

Пакеты СтериТ® комбинированные самоклеящиеся

для

паровой

воздушной

этиленоксидной

пароформальдегидной

радиационной

стерилизации

РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ С 1992 ГОДА

Пакеты СтериТ® комбинированные самоклеящиеся для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации с индикаторами класса 1 ПКСТУ



- ✓ продукция соответствует ГОСТ ISO 11607-1-2018
- ✓ имеют регистрационные удостоверения
- ✓ просты и удобны в использовании
- ✓ не требуют дополнительного оборудования для запаивания
- ✓ сквозная перфорация в месте сгиба клапана позволит легко и быстро запечатать пакет
- ✓ на бумажной стороне пакета нанесён индикатор 1 класса - легко отличить пакеты, прошедшие стерилизацию
- ✓ прозрачная сторона позволяет видеть содержимое пакета
- ✓ проницаемы для соответствующих стерилизующих агентов
- ✓ сохраняют стерильность изделий после стерилизации

Срок годности - 7 лет

Срок сохранения стерильности - 5 лет

Пакеты СтериТ® комбинированные самоклеящиеся для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации с индикаторами класса 1 ПКСТУ



Применение:

Пакет заполняйте не более чем на $\frac{3}{4}$ объема и длины:

- чтобы не повредить пакет при упаковывании изделия
- компенсировать расширение упаковки во время стадии вакуумирования (при паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной стерилизациях)
- дать свободный доступ для стерилизующего агента

Вскрывают пакет с помощью ножниц по линии обозначенной на бумажной стороне.

Нерабочая часть инструмента должна быть обращена в сторону вскрытия пакета.

При размещении рядом комбинированных пакетов соблюдают правило «бумага к бумаге, пленка к пленке».

Хранить в сухом, чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.